



Guldmann CareLift Management System – **Online**

Optimiert Ihre Investition

Erhöhen Ihre Deckenlifter die Sicherheit des Umfelds bei der Betreuung der Patienten und verringern das Verletzungsrisiko für das Pflegepersonal?

Verwendet Ihr Personal die Deckenlifter bei jeder Gelegenheit?

Lohnt sich Ihre Investition tatsächlich?

Guldmann CLM System - Online bietet eine sofortige Übersicht und zeichnet auf, wann und wie oft jeder Deckenlifter in der Einrichtung verwendet wird. Das System kann Sie auch erinnern, wann obligatorische Sicherheitsinspektionen fällig sind.

Das CLM-System verwandelt Daten in Informationen, und mithilfe dieser Informationen können Sie:

- die Prozesse für den sicheren Umgang mit Patienten überwachen und verbessern, um Risiken weiter zu verringern und Arbeitsunfälle zu vermeiden
- die Ressourcenplanung optimieren
- Konformität sicherstellen und Haftungsfragen ausschließen – und Ausfallzeiten vorbeugen

Das CLM-Online-System ist ein Serviceprogramm für Fachkräfte, mit dem sie ihre Kompetenz noch weiter steigern können – und so mehr **Zeit für die Pflege** haben.

Aktuelle Informationen zur Patientenpflege – überall – jederzeit!



Erfassung von Daten	Übertragung von Daten in die Kundendatenbank	Verarbeitung und Darstellung der Informationen
GH3+ und CLM-Modul und/oder Servicemodul und Waagemodul	GH3+ WLAN-Modul + zugehörige Einrichtungsdatenbank	CLM Viewer



1. Erfassung von Daten über die Nutzung aller in der gesamten Einrichtung montierten Deckenlifter
2. Die gesammelten Daten werden kabellos und kontinuierlich von den Deckenliftern über eine WLAN-Verbindung übertragen
3. Die eingehenden Daten werden in der Guldmann-CLM-Software zu Informationen verarbeitet und automatisch in einem benutzerfreundlichen und verständlichen Format mit dem CLM Viewer dargestellt

Guldmann-CLM-System

Ein mit einem CLM- und/oder Servicemodul ausgestattetes GH3+ Hebemodul mit integrierter Waage überwacht die Nutzung und den aktuellen technischen Zustand der Hebeeinheit.

Durch Hinzufügen eines WLAN-Moduls können all Ihre Hebeeinheiten mit dem Internet verbunden und somit von jedem Ort aus jederzeit überwacht werden.

Ob online oder offline, die CLM-Daten und Servicedaten der Deckenliftereinheiten werden im CLM Viewer dargestellt.

Die Online-Version des Guldmann-CLM-Systems wurde entwickelt, um eine Übersicht zu schaffen und Nutzungsdaten innerhalb großer Einrichtungen mit mehreren montierten Deckenliftern in verschiedenen Gebäuden, Stationen und Räumen zu verbreiten.

CLM Viewer


CLM Viewer hält Sie über die Nutzung Ihres Deckenliftersystems auf dem neuesten Stand:

- Werden die Deckenlifter genutzt und wo werden sie am häufigsten eingesetzt (Abteilungen, Stationen, bestimmte Räume, ganzes Krankenhaus)
- Wie oft werden die Deckenlifter genutzt und wann werden sie am häufigsten eingesetzt (arbeitsreichste Zeiten)
- Steigt oder sinkt die Nutzungshäufigkeit im Laufe der Zeit (Jahr, Monat, Woche, Tage)
- Falls eine Waage installiert ist, können Sie sehen, wie schwer die beim Einsatz gehobene Last ist.

- Falls das Servicemodul installiert ist, liefert das CLM Viewer folgende Angaben zu Service und Wartung:
 - Eine Übersicht darüber, wann und wo Sicherheitsinspektionen fällig sind
 - Detaillierte Informationen zu jedem einzelnen Deckenlifter und seinen technischen Daten.

Alle Daten über den ausgewählten Ort und die ausgewählten Zeiträume werden auf dem Dashboard angezeigt.

Usage frequency

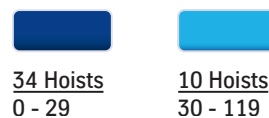

Time to care

V. Guldmann A/S
 Hauptsitz:
 Graham Bells Vej 21-23A
 DK-8200 Aarhus N
 Tel. +45 8741 3100
 Fax +45 8741 3131
 info@guldmann.com
 www.guldmann.com

Guldmann GmbH
 Unter den Eichen 5
 D-65195 Wiesbaden
 Tel. +49 611 974 530
 Fax +49 611 300 018
 info@guldmann.de
 www.guldmann.de